



PARAVAN EZ-Lock

Benutzerhandbuch



Anhang 1 zum
PARAVAN® - **Benutzerhandbuch**



BEDIENUNGSANLEITUNG
EZ - LOCK

EZ Lock Rückhaltesystem für Rollstühle

BETRIEBSANLEITUNG

Bevor Sie das EZ LOCK Rückhaltesystem für Rollstühle benutzen, sollten Sie sich mit dem Gerät und seiner Handhabung vertraut machen.

Die ECU Schalttafel

ECU ist die Hauptschalttafel für das BL-6290 Rollstuhlrückhaltesystem. ECU steuert die Funktionen für das Lösen des Rollstuhls und für die Deaktivierung des Warnsignaltons. Außerdem hat ECU 3 Leuchtanzeigen, die den Benutzer über den aktuellen Status des Systems informieren (s. Abbildung).

Die Basisverriegelung (BL-6290) ist die Andockstation, die auf dem Fahrzeugboden angebracht wird, und die Halterung des Autositzes wird mit Ihrem Rollstuhl verbunden und fungiert somit als Zwischenstück zwischen Rollstuhl und Basisverriegelung.

Einfahren des Rollstuhls in das System

Um den Rollstuhl in das System einfädeln zu lassen, müssen Sie mit dem Rollstuhl nur über die Basisverriegelung fahren bis der Rollstuhl vollständig eingerastet ist. Sobald dann die Zündung gestartet wird gibt es einen hörbaren und visuellen Alarm, der Sie warnt falls der Rollstuhl nicht vollständig in der Basisverriegelung eingerastet ist. Sollte der Alarm losgehen, so müssen Sie die Zündung ausschalten, aus der Verriegelung wieder herausfahren und erneut in das System einfahren.

Ausfahren aus dem System

Um aus dem System herauszufahren, schalten Sie die Zündung aus und betätigen Sie den Entriegelungsknopf (RELEASE). Sobald der Entriegelungsknopf betätigt wird, öffnet sich die Basisverriegelung für 5 Sekunden, sodass Sie aus der Basisverriegelung herausfahren können. Bitte beachten Sie, dass die Basisverriegelung sich nicht löst, wenn die Zündung eingeschaltet ist; es handelt sich hier um eine wichtige Sicherheitsvorkehrung, die nicht umgangen werden darf. Sollte es in ihrem Fahrzeug einen Stromausfall geben, kann die Basisverriegelung gelöst werden, indem man den Nothebel für die manuelle Entriegelung (Emergency Manual Release Lever) nach links schiebt. Dieser Nothebel befindet sich an der Vorderseite der Basisverriegelung.



Nothebel für die manuelle Entriegelung

Bei Stromausfall kann die Basisverriegelung manuell betätigt werden, indem man den Nothebel nach links schiebt.

BL-6290 Basisverriegelung

Die BL-6290 Basisverriegelung wird auf dem Fahrzeugboden angebracht. Hier rastet die an Ihrem Rollstuhl befestigte Halterung ein.

Achtung

Nur von EZ LOCK geprüfte und für gut befundene Rollstühle sind für das System geeignet. Bitte versuchen Sie nicht irgendwelche Komponenten des Systems zu verändern.

Allgemeine Information

Für optimale Funktion muss, ein individuell angepasstes und in das Fahrzeug installiertes Gurtsystem für Schoß und Schulter verwendet werden. Die Rollstuhlräder müssen nach Herstellerangaben aufgepumpt sein und der Reifendruck sollte regelmäßig überprüft werden. Sollte es aus irgendeinem Grund schwierig sein, den Rollstuhl in das System einzufädeln oder herauszufahren, kontaktieren Sie bitte den Händler, der es eingebaut hat oder rufen Sie die Firma EZ LOCK Incorporated unter folgender Nummer an: (225) 214-4620, um zu erfahren wo sich der nächstgelegene autorisierte Händler befindet

Begrenzte Produkthaftung

EZ LOCK Incorporated in Baton Rouge, Louisiana, U.S.A. gibt ein 1 Jahr Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler, vorausgesetzt, die Produkte wurden von einem autorisierten Händler richtig eingebaut und werden richtig bedient. Diese Garantie beschränkt sich auf den Erstkäufer und deckt keine Schäden am Fahrzeug ab, in das es eingebaut wurde, oder Schäden am Produkt, das von Fehlern am Fahrzeug herrührt. Diese Garantie beschränkt sich auf die Verwendung von Rollstühlen, die vorher geprüft wurden und von der Fa. EZ LOCK Incorporated als für das System tauglich befunden wurden. Darüber hinaus deckt diese Garantie auch keinen Einbau ab, der mit den Anweisungen für den Einbau und für die spezielle Anwendung nicht zu vereinbaren ist. Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum bzw. mit der ersten Verwendung, vorausgesetzt der untere Teil der

Garantieregistrierungskarte wurde innerhalb von 10 Arbeitstagen vollständig und korrekt ausgefüllt an EZ Lock Inc. geschickt. EZ Lock Inc. übernimmt unter keinen Umständen die Verantwortung für den Verlust des Fahrzeuges in dem das System eingebaut ist oder für einen Zeitverlust. EZ Lock Inc. übernimmt auf keinen Fall die Garantie für einen Schaden der von der Verwendung von Systemkomponenten herrührt, die nicht von EZ Lock hergestellt wurden, oder für die Anwendung von Systemkomponenten bei einem Rollstuhl, der nicht von der Fa. EZ Lock Inc. für die Verwendung mit dem EZ Lock Rückhaltesystem geprüft wurde. Diese Garantie ist null und nichtig, wenn das Produkt durch einen Unfall, durch falsches Verwenden oder durch Nachlässigkeit beschädigt wird, oder wenn es auf irgendeine Weise verändert wird. Beschädigte Teile müssen durch einen autorisierten Händler zurückgegeben werden, der Transport hierfür muss vom Absender bezahlt werden und mit einer Autorisierungsnummer für die Inspektion versehen sein, bevor EZ Lock das Produkt reparieren oder ersetzen kann. Diese Garantie ersetzt alle anderen Garantien oder Bedingungen, einschließlich der Eignung für den Verkauf oder für einen speziellen Zweck.

Fahrer, die dieses System verwenden, müssen auch die vertikale STABL-VT Stabilisierung verwenden.

Halten Sie das System sauber, trocken und frei von Schmutzpartikeln.


Lassen Sie das System regelmäßig überprüfen.

Schnallen Sie sich immer an.

ACHTUNG

vergewissern Sie sich, dass der Rollstuhl vollständig in die Basisverriegelung eingerastet ist.


ENTRIEGELUNG

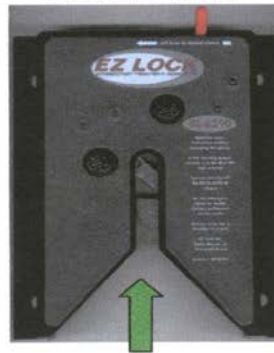

Einfahren in die Basisverriegelung

Führen Sie den mit EZ Lock kompatiblen Rollstuhl (mit den angebrachten Zwischenstücken) in die Basisverriegelung ein bis er vollständig einrastet.

Vergewissern Sie sich, dass auf der ECU-2 Schaltfläche das grüne Licht leuchtet.

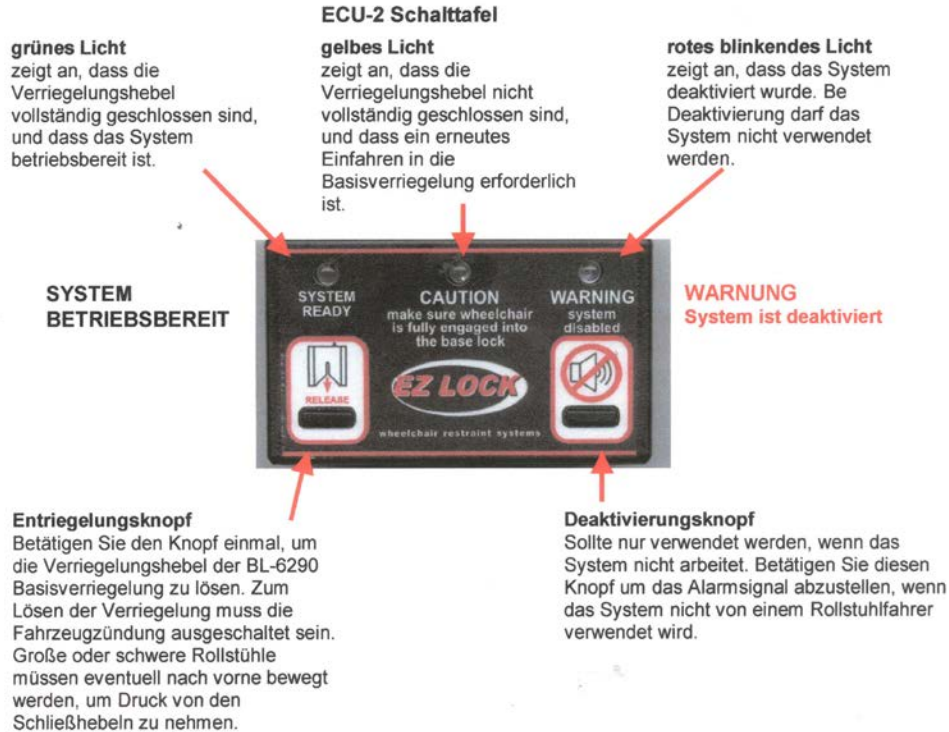



PARAVAN® .de
BEHINDERTENGERECHTE FAHRZEUGUMBAUTEN



PARAVAN GmbH

PARAVAN Str. 5-10
D-72539 Pfronstetten-Aichelau
Deutschland

Tel: +49 (0)7388 - 99 95 60
Fax: +49 (0)7388 - 99 95 999
Web: www.PARAVAN.de
Mail: info@PARAVAN.de

