



# Die PARAVAN Kopf- und Rückenstütze Fahrer

## Benutzerhandbuch

Benutzerhandbuch/KRS Fahrer/Version 1.00



# Benutzerhandbuch für die Paravan Kopf-& Rückenstütze Fahrerseite

Sicher und bequem mit dem Rollstuhl an der Fahrerseite fixiert werden.

## Einleitung

Sie haben sich für eine PARAVAN – Kopf- & Rückenstütze für die Fahrerseite entschieden. Hierfür möchten wir uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen bedanken!

Wie immer beziehen Sie ein Produkt, das Paravan selbst hergestellt und für die Bedürfnisse behinderter Menschen entwickelt hat. Unsere Produkte zeichnen sich durch Stabilität, Qualität und das bewährte Baukastensystem aus.




**ACHTUNG:**

Beachten Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz anderer besonders die Warnhinweise in diesen roten Feldern.

# 1. Verwendungszweck

Die PARAVAN – Kopf- und Rückenstütze Fahrer ist speziell für Fahrer mit einem Starr- oder Faltrollstuhl konzipiert. Sie besteht aus drei elektrisch bedienbaren Funktionen: der stabilen und crashgetesteten Kopf- und Rückenstütze (A), dem individuellen Rückhaltesystem (B) und der Paravan-Armlehne (C). Befestigt ist die Kopf- und Rückenstütze an der B-Säule der Fahrerseite (D).

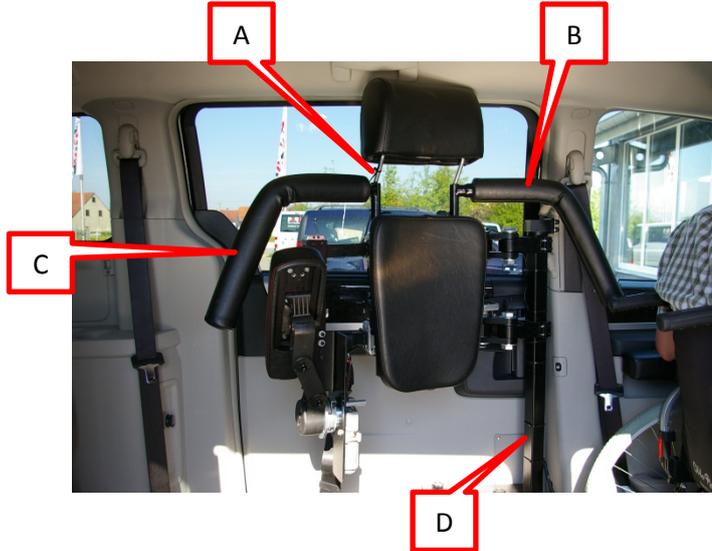

**A:** automatisch bewegliche Kopf- und Rückenstütze; **B:** individuell verstellbares Rückhaltesystem (hier: Bügelsystem); **C:** elektrisch verstellbare Armlehne; **D:** Befestigung an der B-Säule.

## 2. Modelvarianten



### 1. Modellvariante:

Die Kopf- und Rückenstütze mit  
Bügelhalterung.




### 2. Modellvariante:

Die Kopf- und Rückenstütze mit  
Hosenträgergurt.

### 3. Bedienung der Kopf- und Rückenstütze


Bedienen Sie die automatische Kopf- und Rückenstütze mit den dafür vorgesehenen Steuerungstasten oder einer Fernbedienung. Die Steuerungstasten sind bei Ihnen individuell im Fahrzeug montiert.

Für jede der drei elektrischen Funktionen ist eine von drei Steuerungstasten(A) vorgesehen: Schwenken der Kopf- und Rückenstütze(B), Ausklappen des individuellen Rückhaltesystems(C), Herunterklappen der Armlehne(D).

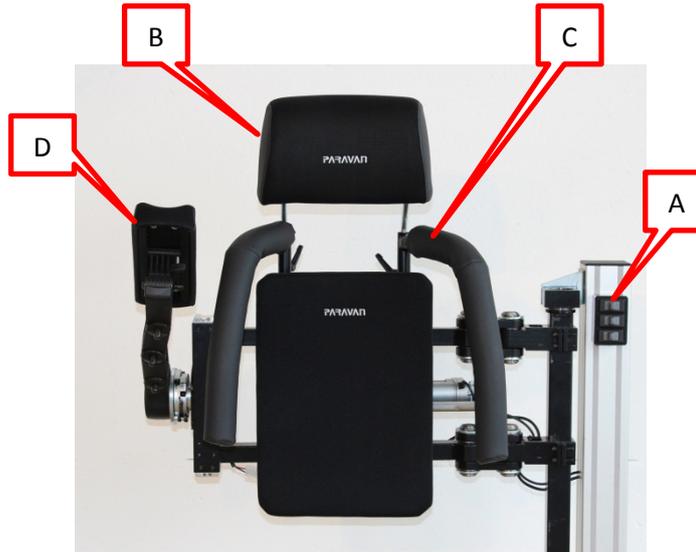

### 3.1. Das Beidenpanel

Das Bedienpanel der Kopf- und Rückenstütze ist mit den verschiedenen Positionen frei belegbar.

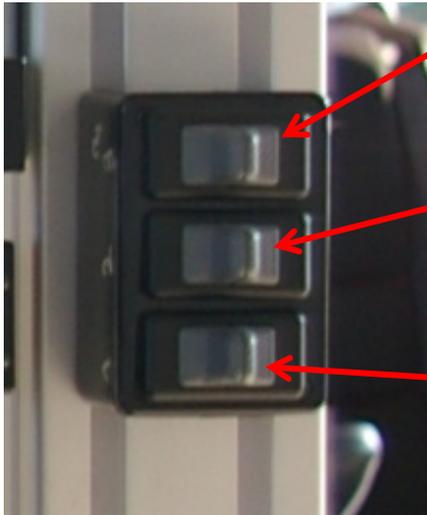

1. Durch das rechts/links Schieben der ersten Taste schwenkt die Kopf- und Rückenstütze entweder nach vorne an Ihren Körper heran oder wieder in die Ausgangsposition zurück.

2. Durch das rechts/links Schieben der zweiten Taste fährt das Rückhaltesystem der Kopf- und Rückenstütze nach vorne aus und sichert den Oberkörper. Der herkömmliche Dreipunktgurt wird so ersetzt. Beim betätigen des Knopfes in entgegengesetzter Richtung (links- oder rechts) klappt das Rückhaltesystem wieder zurück.

3. Durch das rechts/links Schieben der dritten Taste klappt entweder die Armlehne nach unten, oder nach oben.



**1. Ausschwenken**



**2. Automatisch Angurten**



**3. Armlehne herunterklappen**

### 3.2. Gurt und Armlehne



Das elektrisch bedienbare Rückhaltesystem der Kopf- und Rückenstütze ersetzt den herkömmlichen Dreipunktgurt. Ein selbständiges Angurten ist daher auch mit einer starken Bewegungseinschränkung möglich. Zudem sichert und stabilisiert die Kopf- und Rückenstütze den Oberkörper, sowie den Kopf des Fahrers.




#### **ACHTUNG:**

1. Achten Sie beim Betätigen der elektrischen Kopf- und Rückenstütze darauf, dass keine Gegenstände, Finger oder andere Gliedmaßen zwischen die beweglichen Teile gelangen oder an die Motoren geraten. Es besteht Quetschgefahr!
2. Halten Sie während der gesamten Fahrt das Rückhaltesystem geschlossen. Es besteht Verletzungsgefahr!
3. Wenn Sie mit dem Paravan- Space- Drive- System fahren, benutzen Sie unbedingt bei jeder Fahrt die elektrische Armlehne. Diese sorgt für mehr Stabilität beim Autofahren.

## 4. Entsichern nach der Fahrt

Um sich nach der Fahrt wieder ab zu schnallen und die Kopf- und Rückenstütze in ihre Ausgangsposition zurück zu schwenken benutzen Sie die drei Bedientasten des Bedienpanels der Kopf- und Rückenstütze.

Mit Hilfe des Bedienpanels klappen Sie zuerst die Armlehne wieder nach oben(A), anschließend lösen Sie das Rückhaltesystem und klappen es nach außen(B). Zum Schluss schwenken Sie die Kopf und Rückenstütze nach hinten weg(C).

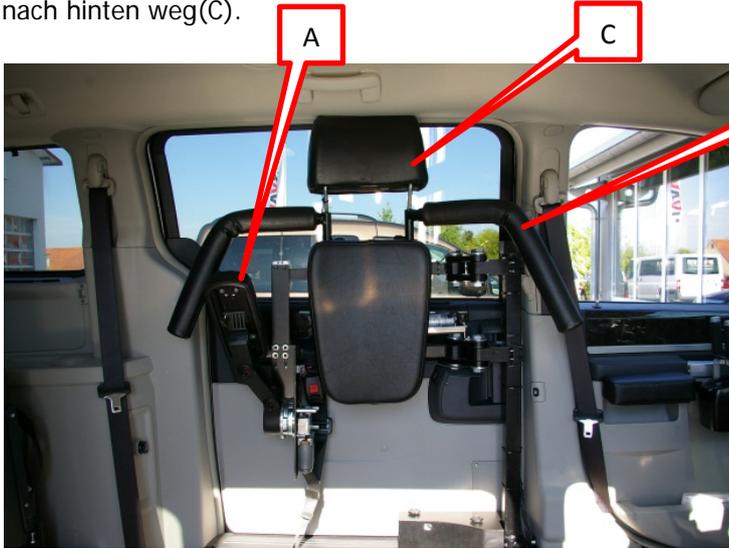

**ACHTUNG:**

Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder andere Gegenstände hinter der Kopf- und Rückenstütze befinden. Es besteht Verletzungsgefahr!

# Inhalt

<b>Einleitung</b> .....	1
1. Verwendungszweck.....	2
2. Modelvarianten .....	3
3. Bedienung der Kopf- und Rückenstütze .....	4
3.1. Das Beidenpanel.....	5
3.2. Gurt und Armlehne.....	7
4. Entsichern nach der Fahrt .....	8



**PARAVAN**<sup>®</sup>.de  
BEHINDERTENGERECHTE FAHRZEUGUMBAUTEN



## PARAVAN GmbH

PARAVAN Str. 5-10  
D-72539 Pfronstetten-Aichelau  
Deutschland

Tel: +49 (0)7388 - 99 95 60  
Fax: +49 (0)7388 - 99 95 999  
Web: [www.PARAVAN.de](http://www.PARAVAN.de)  
Mail: [info@PARAVAN.de](mailto:info@PARAVAN.de)

