

# Benutzerhandbuch für die Paravan Kopf-& Rückenstütze Beifahrer

Sicher und bequem mit dem Rollstuhl an der Beifahrerseite fixiert werden.

## Einleitung

Sie haben sich für eine PARAVAN – Kopf- & Rückenstütze für die Beifahrerseite entschieden. Hierfür möchten wir uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen bedanken!

Wie immer beziehen Sie ein Produkt, das Paravan selbst hergestellt und für die Bedürfnisse behinderter Menschen entwickelt hat. Unsere Produkte zeichnen sich durch Stabilität, Qualität und das bewährte Baukastensystem aus.




**ACHTUNG:**

Beachten Sie zu Ihrem und zum Schutze anderer besonders die Warnhinweise in den roten Feldern!!!

## 1. Verwendungszweck

Die PARAVAN – Rückenstütze demontierbar (RSD) ist speziell für Beifahrer im Rollstuhl konzipiert. Sie besteht aus einer B-Säulen-Befestigung (A), einer Mittensäulen-Befestigung (B) und einer manuell abnehmbaren Einheit (C), an der ein Rückenschild und eine Kopfstütze befestigt ist. Diese Einheit lässt sich mit wenigen Handgriffen entfernen, sodass von hinten her ein freier Zugang für den Rollstuhlfahrer zur Beifahrerposition ermöglicht wird.

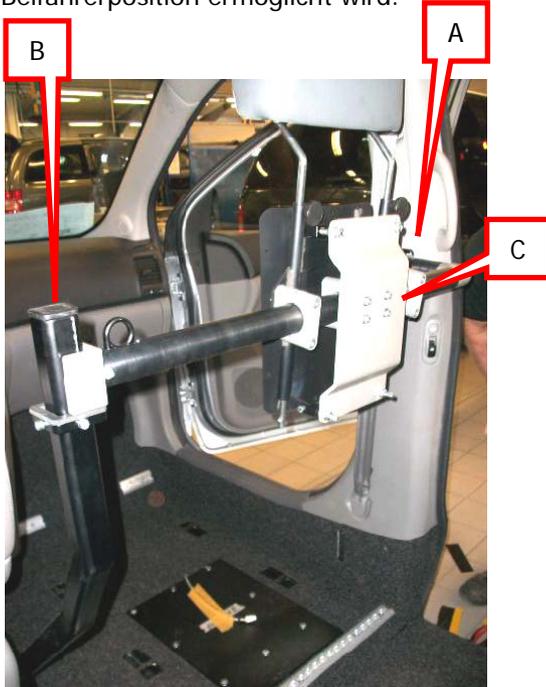

## 2. Handhabung der Kopf- und Rückenstütze Beifahrer

Das abnehmbare Teil, welches aus einem Rückenschild und einer Kopfstütze besteht, ist so konzipiert, dass es von einer Person mit wenigen Handgriffen ein- und auch wieder ausgebaut werden kann.

### 2.1. Einsetzen der demontierbaren Kopf- und Rückenstütze an der B-Säule




Zum Einsetzen des abnehmbaren Teils wird auf der rechten Seite (an der B-Säule) ein Riegel in die Bohrung der Arretierplatte eingesteckt.




ACHTUNG:

Der Riegel muss fest in der Arretierplatte verankert sein.  
Es kann sonst zu Verletzungen kommen.

## 2.2. Einsetzen der Kopf- und Rückenstütze an der Mittensäule

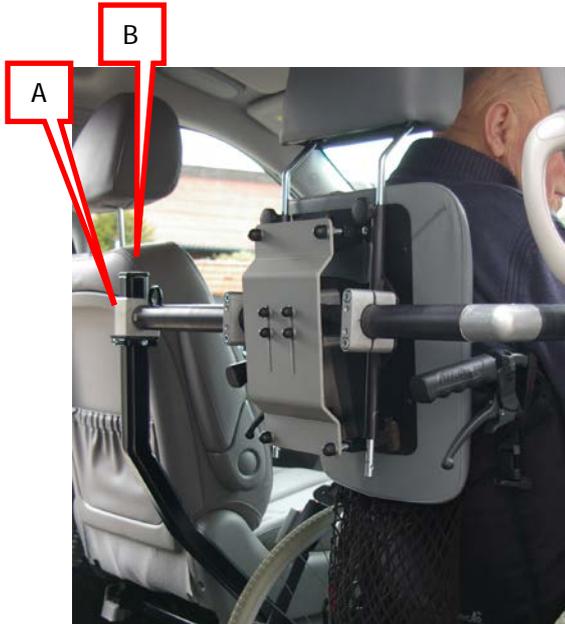

Auf der linken Seite muss anschließend der U-förmige Riegel(A) über die Mittensäule(B) geschoben werden, bis dieser in der vorgesehene Bohrung verankert.

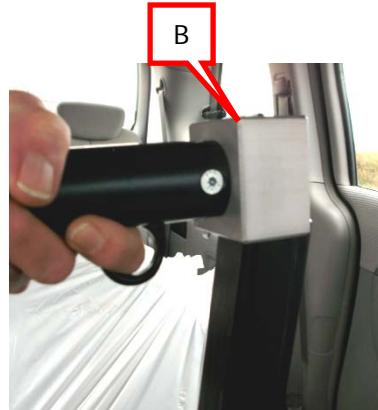

Durch das nach hinten ziehen des Pistolengriffs(A) lässt sich der U- förmige Riegel(B) sehr einfach über die Mittensäule(C) schieben und soweit nach unten bewegen, bis die Arretierung in die dafür vorgesehene Bohrung der Mittensäule einrastet.



**ACHTUNG:**

Die Arretierung des Riegels muss fest in der Bohrung der Mittensäule verankert sein!  
Zudem muss darauf geachtet werden, dass sich keine Gegenstände zwischen Mittensäule und dem Riegel befinden, da es sonst zu Verletzungen kommen kann!

### 2.3. Entnahme der Kopf- und Rückenstütze



Den Pistolengriff(A) der Arretierung anziehen, dadurch den Arretierbolzen aus der Verankerung lösen und langsam nach oben ziehen, bis der U- förmige Riegel(B) wieder frei über der Mittensäule beweglich ist.



Anschließend den Riegel an der B-Säule aus der Arretierplatte lösen und die Kopf- und Rückenstütze vorsichtig entfernen.

Zum Lösen des Riegels erst diesen nach außen ziehen(A) und anschließend nach oben heben(B).



**ACHTUNG:**

Verstauen Sie die Kopf- und Rückenstütze bei Nichtgebrauch und lassen Sie sie nicht ungesichert im Fahrzeug liegen. Es kann zu Personen und/ oder erheblichen Sachschäden am Fahrzeug oder der Kopf- und Rückenstütze selbst kommen.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Einleitung</b> .....	<b>1</b>
<b>1. Verwendungszweck</b> .....	<b>2</b>
<b>2. Handhabung der Kopf- und Rückenstütze Beifahrer</b> .....	<b>3</b>
2.1. Einsetzen der demontierbaren Kopf- und Rückenstütze an der B-Säule.....	3
2.2. Einsetzen der Kopf- und Rückenstütze an der Mittensäule .....	5
2.3. Entnahme der Kopf- und Rückenstütze .....	7



**PARAVAN**<sup>®</sup>.de  
BEHINDERTENGERECHTE FAHRZEUGUMBAUTEN



## PARAVAN GmbH

PARAVAN Str. 5-10  
D-72539 Pfronstetten-Aichelau  
Deutschland

Tel: +49 (0)7388 - 99 95 60  
Fax: +49 (0)7388 - 99 95 999  
Web: [www.PARAVAN.de](http://www.PARAVAN.de)  
Mail: [info@PARAVAN.de](mailto:info@PARAVAN.de)

